

사용 설명서

결핵진단액 (PPD-T)

1. 원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

가. 유효성분

° PPD Tuberculin powder-----0.2mg/0.1ml

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적제제

나. 성상 : 무색의 수성현탁주사액으로 페놀냄새가 나며 이물이 없고
내용물의 성상이 균일함

3. 효능 및 효과

이 진단액은 소 및 유산양의 결핵병 검색을 위한 피내반응용 항원으로 사용.

4. 용법 및 용량

가. 피내주사 반응 실시방법

1) 소 : 원액 0.1ml를 미근부 추벽부 피내에 주사

2) 유산양 : 0.5% 석탄산액으로 2배 희석하여 0.1ml를 미근부 추벽부 피내에 주사

나. 판 정

주사후 48~72시간에 주사부위의 종창의 크기를 측정하고 아래와 같이 판정한다.

양 성 : 종창차가 5mm 이상인 것

음 성 : 종창차가 3mm 이하인 것

의양성 : 종창차가 3mm 이상 5mm이하이며 양성인지 음성인지
확실치 않는 것

5. 포장단위

50두/병

6. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 2~8℃의 냉암소 보관.

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월.

7. 주의사항

가. 사용 전에 사용설명서를 충분히 참조하십시오.

나. 진단업무는 반드시 자격이 인정된 수의사만이 할 수 있습니다.

다. 사용 전에 잘 흔들어야 합니다.

라. 정확히 미근부 추벽피내에 주사하여야 합니다.

마. 주사부위는 알콜면으로 소독한 후 완전히 건조한 다음 주사하십시오.

바. 쓰다 남은 진단액은 잡균의 오염이나 효력이 상실될 우려가 있으니
사용하지 마십시오.

사. 동결되었던 진단액은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.

아. 재검사를 할 때에는 적어도 30일 이상의 간격을 두어야 합니다.

자. 기타 자세한 사항은 제조회사에 문의하십시오.